

CATETER DE CRIOABLAÇÃO

Arctic Front Advance Pro™

23 mm e 28 mm

Especificações do produto

Informação do produto

Referência

AFAPRO23	Arctic Front Advance Pro™ 23 mm
AFAPRO28	Arctic Front Advance Pro™ 28 mm

Especificações do cateter

Tamanho

Diâmetro do balão inflado	23 mm ou 28 mm
Tamanho do cateter, diâmetro externo	10,5 Fr
Comprimento total	140 cm
Comprimento útil	95 ± 2 cm
Comprimento da ponta distal	8 mm

Compatibilidade

Introdutor recomendado	Introdutor defletível FlexCath Advance™
Compatibilidade com guias de metal	0,032"-0,035"
Cateter de mapeamento recomendado	Família Achieve™

Curvatura e alcance

Curvatura	Bidirecional 45°
-----------	------------------

Material

Ponta y corpo	Copolímero biocompatível (Pebax™) com sulfato de bário misturado (BaSO ₄)
Balão externo	Poliuretano



O cateter de crioablação cardíaca Arctic Front Advance Pro™ é indicado para o tratamento da fibrilação atrial e usa a criotecnologia EvenCool™.

O balão de crioablação Arctic Front Advance Pro™ é introduzido sobre um guia de mapeamento da família Achieve™ ou cateter e através do introdutor FlexCath Advance™ defletível no átrio esquerdo, onde pode ser inflado e avançado até a veia desejada. O óxido nítrico é fornecido através de um tubo de injeção para a superfície interna do balão. Conforme o refrigerante evapora, ele absorve calor do tecido circundante e o CryoConsole™ é sugado de volta para o vácuo.

O Balão de crioablação Arctic Front Advance Pro™ está disponível em dois tamanhos.

Medtronic

Componentes do balão de crioblação Arctic Front Advance Pro™



Informação adicional

O Cateter de Crioblação Cardíaca Arctic Front Advance Pro™ é fornecido estéril e embalado individualmente. É um dispositivo de uso único. Possui um termopar localizado dentro do balão interno. O usuário tem a possibilidade de predefinir o tempo de crioblação.

O uso do kit de retração manual pode ser necessário no caso improvável de que o procedimento de retração do balão do CryoConsole não possa ser usado.

Nota

Cateter de crioblação cardíaca Arctic Front Advance Pro™

Consulte o manual do dispositivo para obter informações detalhadas sobre instruções, indicações, contra-indicações, Avisos, precauções e possíveis eventos adversos. Para obter mais informações, entre em contato com seu local Medtronic

ANVISA 10339190452

Medtronic e o logotipo da Medtronic são marcas comerciais da Medtronic.™ As marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários. Todas as outras marcas são marcas comerciais da empresa Medtronic.

Medtronic

Brasil

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 -
11º
andar
São Paulo, SP, 04576-010
Brasil
Tel. 55 11 2182-9200
Fax: 55 11 2182-92400.

medtronicbrasil.com.br