

Arctic Front Advance PRO™


Cateter de crioablação

O cateter de crioablação cardíaca Arctic Front Advance Pro™ é indicado para o tratamento da fibrilação atrial e usa a criotecnologia EvenCool™.

O balão de crioablação Arctic Front Advance Pro™ é introduzido sobre um guia de mapeamento da família Achieve™ ou cateter e através do introdutor FlexCath Advance™ defletível no átrio esquerdo, onde pode ser inflado e avançado até a veia desejada. O óxido nitroso é fornecido através de um tubo de injeção para a superfície interna do balão.

Conforme o mesmo evapora, ele absorve calor do tecido circundante e o CryoConsole™ é sugado de volta para o vácuo.

O balão de crioablação Arctic Front Advance Pro™ está disponível em dois tamanhos.

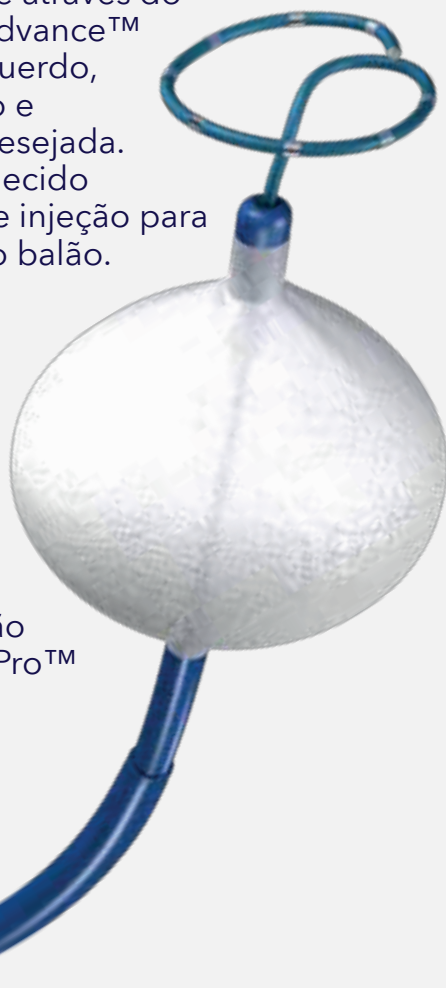

Especificações do produto

Informação do produto

Referência

AFAPRO28	Arctic Front Advance Pro™ 28 mm
----------	------------------------------------

Especificações do cateter

Tamanho

Diâmetro do balão inflado	28 mm
Tamanho do cateter, diâmetro externo	10,5 Fr
Comprimento total	140 cm
Comprimento útil	95 ± 2 cm
Comprimento da ponta distal	8 mm

Compatibilidade

Introdutor recomendado	Introdutor defletível FlexCath Advance™
Compatibilidade com guias de metal	0,032" - 0,035"
Cateter de mapeamento recomendado	Família Achieve™


Curvatura e alcance

Curvatura	Bidirecional 45°
-----------	------------------

Material

Ponta e corpo	Copolímero biocompatível (Pebax™) com sulfato de bário misturado (BaSO ₄)
Balão externo	Poliuretano

Componentes do balão de crioablação Arctic Front Advance Pro™

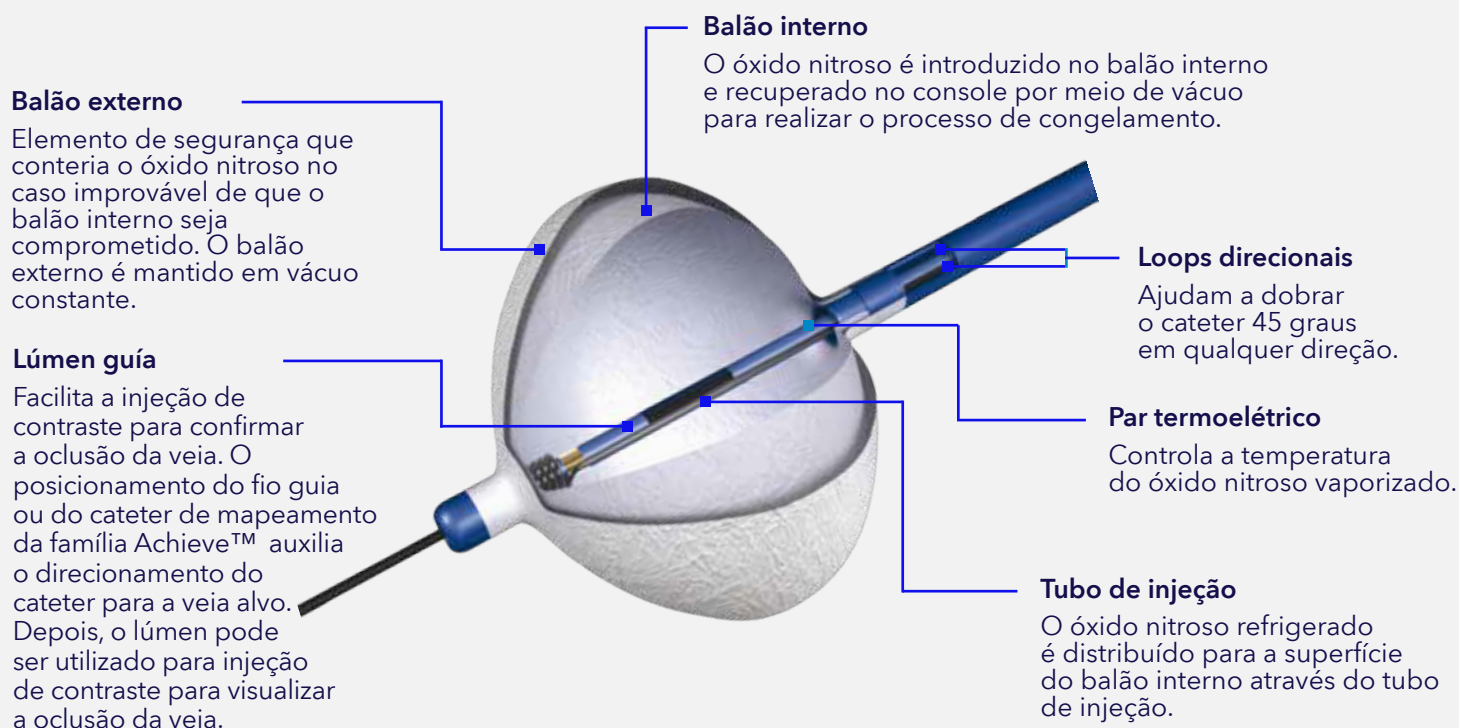

Informação Adicional

O cateter de crioablação cardíaca Arctic Front Advance Pro™ é fornecido estéril e embalado individualmente. É um dispositivo de uso único. Possui um termopar localizado dentro do balão interno. O usuário tem a possibilidade de predefinir o tempo de crioablação. O uso do kit de retração manual pode ser necessário no caso improvável de que o procedimento de retração do balão do CryoConsole™ não possa ser usado.

Nota: cateter de crioablação cardíaca Arctic Front Advance Pro™.

Consulte o manual do dispositivo para obter informações detalhadas sobre instruções, indicações, contraindicações, avisos, precauções e possíveis eventos adversos. Para obter mais informações, entre em contato com seu local Medtronic.

Brasil

Av. Jornalista Roberto Marinho, 85 - 11º andar
São Paulo, SP, 04576-010 - Brasil
Tel. +55 (11) 2182-9200

[medtronic.com/br](https://www.medtronic.com/br)